




Ver el Manual de usuario para información más detallada:
<http://www.mttts-asia.com/firefly-phototherapy/>

Panel de control

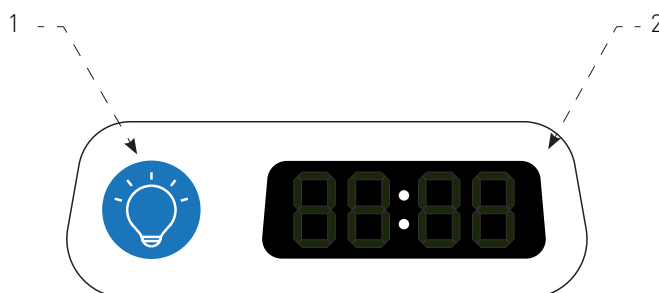

1. Botón de encendido - Enciende y apaga el dispositivo.
2. Pantalla - Muestra el 'tiempo de tratamiento', así como las 'horas totales de uso del dispositivo' Firefly.

Advertencias



Mensajes de error: En el caso de que Firefly sufra un error menor, el número de error se mostrará en el panel de control. Firefly sigue siendo seguro, pero, por favor, contactar con MTTTS y mencionar el número de error y el número de serie del dispositivo.



Advertencia sobre la vida útil de los LED: Los LED azules de Firefly proporcionan un tratamiento eficaz durante 60 000 horas.

Información de seguridad




NO mover el Firefly mientras el paciente está en el dispositivo.



Cuando se utiliza la fototerapia con Firefly el paciente debe colocarse SIEMPRE en la cuna.

Crterios de medici3n de la irradiaci3n

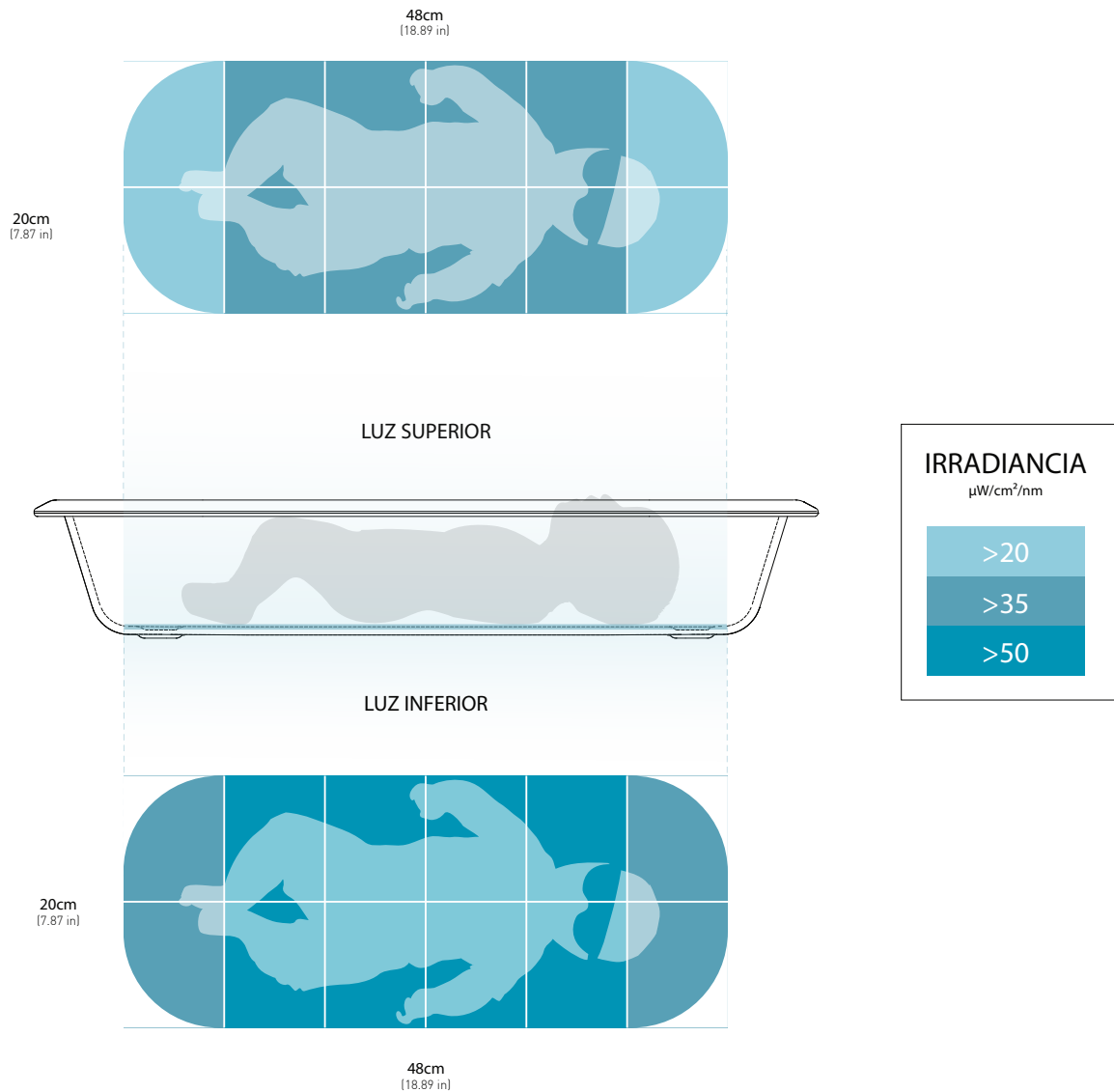

Limpieza y desinfecci3n



- ✓ Desinfectar la cuna solamente con una soluci3n que contenga por lo menos 70% de alcohol. Aplicar el desinfectante con un pa3o limpio o una esponja blanda. Esperar a que el dispositivo se seque despu3s de limpiar o desinfectar antes de usarlo.
- ✗ NO usar alcohol para desinfectar ninguna otra parte del dispositivo.
- ✗ NO sumergir ninguna parte del dispositivo en agua o alcohol.