



Xem sách hướng dẫn sử dụng để có thông tin đầy đủ hơn:
<http://www.mttts-asia.com/vi/giuong-suoi-so-sinh-wallaby/>

Danh sách phụ kiện tùy chọn



Cột Truyền (WLB-1030)



Ngăn Kéo (WLB-1050)



Giá đựng bình Oxy (WLB-1060)



Kệ (WLB-1040)



Cột Giữ (WLB-1100)


Giá đựng bình Oxy (WLB-1060)




2 x Bu lông M10x25

Ngăn Kéo (WLB-1050)

- 1 Tháo rời phần thân trên và thân dưới
Ấn chốt màu đen ở hai đầu và đẩy ra

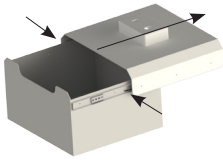

- 2 Lắp phần thân trên vào bộ điều khiển
Sử dụng 2 bu-lông có kích thước M10x25

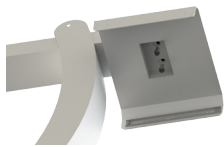

- 3 Lắp phần thân dưới và trượt vào đúng vị trí cho
đến khi bạn nghe thấy tiếng “click” là được.



Cột Truyền (WLB-1030), Kệ (WLB-1040), Cột Giữ (WLB-1100)

